

多参数监护仪质量检测原始记录表

检测人:		检测日期:		检测类别:	<input type="checkbox"/> 新购验收 <input type="checkbox"/> 周期性检测 <input type="checkbox"/> 维修后检测				
使用科室:		放置地点:		设备编号:		负责人:		联系电话:	
制造厂家:		型号规格:		环境条件:	温度: ℃ ; 相对湿度: %				
外观检查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		监护仪基本标识应有生产厂家、型号、出厂日期及编号、电源额定电压等。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		外观完好, 附件齐全。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		设备按钮、旋钮及触摸屏等功能正常。						
性能检测									
心率 (次/分)	设定值	30	60	90	120	180	允许误差		结果
	测量值						± (示值 5%±1) 次/分		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
呼吸率 (次/分)	设定值	10	20	40	60	80	± (示值 5%±1) 次/分		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	测量值								
血氧饱和度 (%)	设定值	80	90	95	97	100	±3% (直接加减, 非比例)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	测量值								
NIBP 静态压力 (mmHg)	模拟器	50:	100:	150:	200:	250:	首次检测: ±3mmHg; 使用中检测: ±4mmHg		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	测量值								
血压示值 重复性 (mmHg)	设定值	成人: 150mmHg/100mmHg, 80BPM; 儿童: 60mmHg/30mmHg, 120BPM					重复性		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	5次测量值	/	/	/	/	/	≤5mmHg		
气密性	测试条件:	测试压力: 200mmHg; 测试时间: 5min			泄露率:		≤6mmHg/min		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
电气安全检测									
接地电阻	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	绝缘阻抗 (Main-AP)	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		≤300 mΩ					≥10 MΩ		
对地漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	外壳漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		≤5 mA					≤100 μA		
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 零线断开)				测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)		
		≤10 mA					≤500 μA		
应用部分 漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	应用部分 辅助漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		CF≤10 μA /BF≤100 μA					CF≤10 μA /BF≤100 μA		
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)				测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)		
		CF≤50 μA /BF≤500 μA					CF≤50 μA /BF≤500 μA		
安全报警功能检查									
心率限值报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			呼吸频率限值报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
心律失常报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			血氧饱和度限值报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
无创血压限值报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			静音功能		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
测试结果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			备注					