

输液泵质量检测原始记录表

检测人:		检测日期:		检测类别:	<input type="checkbox"/> 新购验收 <input type="checkbox"/> 周期性检测 <input type="checkbox"/> 维修后检测				
使用科室:		放置地点:		设备编号:		负责人:		联系电话:	
制造厂家:		型号规格:		环境条件:	温度: ℃ ; 相对湿度: %				
外观检查	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		设备外观干净整洁, 输液泵门内无污迹, 传感器部位无污痕。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		设备外部电源和内部电源(供电电池)供电时指示应正常。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		泵的所有部件(箱体、电源线、拉栓、架杆、夹钳、泵门等)处于完好状态。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		开关正常, 各种按键或调节旋钮应能正常对设备相关参数进行设置。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		在日常照度或灯光下, 屏幕显示内容应清晰可辨, 时间和日期正确。						
	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		警示标识清晰。报警功能正常, 除指示灯或屏幕显示外, 应同时伴有声音报警。						
性能检测									
流量检测	设定值	三次测量值			平均值	允许误差	结果		
	25 ml/h					±6%	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
	100 ml/h					±6%	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
阻塞报警监测 (25ml/h)	设定值			实测值		允许误差	结果		
	常用报警点 1					±30%或±100mmHg	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
	常用报警点 2						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
电气安全检测									
接地电阻	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	绝缘阻抗 (Main-PE)	测量值	限值		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		≤300 mΩ					≥10 MΩ		
对地漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	外壳漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		≤5 mA					≤100 μA		
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 零线断开)				测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)		
		≤10 mA					≤500 μA		
应用部分 漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	应用部分 辅助漏电流	测量值	限值(正常状态, 极性正常)		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		CF≤10 μA /BF≤100 μA					CF≤10 μA /BF≤100 μA		
	测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)				测量值	限值(NFC 状态: 极性正常, 地线断开)		
		CF≤50 μA /BF≤500 μA					CF≤50 μA /BF≤500 μA		
安全报警功能检查									
阻塞报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			输液完成报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
管路安装不妥		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			遗忘操作报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
泵门开启报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			电池电量不足		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
气泡报警		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用			电源线脱落		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 不适用		
测试结果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			备注	<input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> 单通道 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> 多通道				